

Scaun de toaleta cu roti FS 696

DESCRIERE:



Scaun de toaleta cu roti si pliabil este usor, cu un design compact, utilizat ca si scaun de toaleta sau cadru cu toaleta. Cadrul are o structura de rezistenta realizata din otel, tratat impotriva oxidarii, coroziunii, este reglabil in inaltime, manerele de sprijin sunt realizate din PVC. Cadrul este din otel, acoperit electrochimic, se pliaza pentru reducerea volumului ocupat.

Colacul si capacul comodei WC sunt din PVC, asamblate prin clipsuri de cadrul scaunului, se pot detasa usor pentru a fi curatate eventual cu solutie de sapun si clatite in jet de apa.

Comoda WC se amplaseaza in apropierea patului persoanei cu dizabilitati de deplasare in mentinerea sau recuperarea progresiva in faza post traumatism (accident, interventie medicala, imobilizare gipsata), pentru a facilita transferul acestuia pe comode si ulterior inapoi in pat, sau fotoliu.

MODEL NO.										
	55	44	7.5	7.5	45-55	78-88	50X21X76 (cm)	N.WT(kg)	PCS CN	G.W. (kg)
FS696	55	44	7.5	7.5	45-55	78-88	50X21X76	100	7	8.2

Specificatii tehnice:

- Greutate scaun : 8.2 kg.
- Greutate maxima utilizator: 100 kg.
- Inaltime reglabila: intre 78 - 88 cm, reglabil in 5 trepte-la fiecare 2,5 cm
- Latime : 55 cm.
- Latimea intre manerele de sprijin: 44 cm.
- Functia 4 in 1: functie WC, scaun de camera, scaun de siguranta, scaun pentru dus
- 4 roti pivotante dintre care 2 prevazute cu sistem de blocare .

Comoda poate avea patru functionalitati:

1. WC de camera, este un scaun de toaleta plasat cat mai aproape de patul pacientului cu probleme de deplasare;

2. In cadrul unitatilor medicale, a celor de ingrijire, se scoate vasul colector si se plaseaza peste vasul de WC normal, este o masura de igiena suplimentara, utilizatorul nu vine in contact cu vasul de toaleta

3. Scaun pentru sedere in timpul zilei

4. Scaun pentru dus .

Instructiuni de montaj :



Fig 1.

Aduceti catre partea din fata lateralele si ridicati partea de sezut astfel incat cele doua urechi de fixare sa vina peste cele doua laterale **Fig 1.**

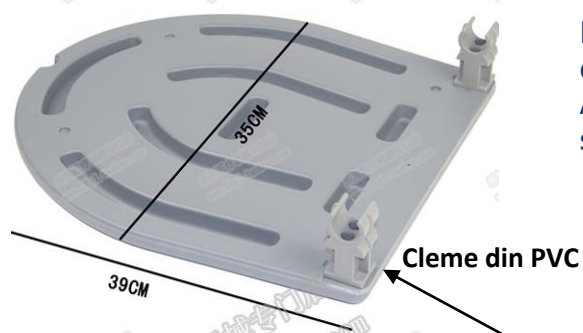


Fig 2.

Montati colacul comodei. Acesta are doua cleme din PVC pentru fixarea pe sezutul . Acestea intra prin presare pe bara din spate a sezutului .**Fig 2.**



Fig 3.

Recipientul pentru necesitati se introduce sub colac prin culisare pe cele doua bare de sustinere. **Fig 3.**

In recipientul pentru necesitati se pune un sac menajer din pvc cu capacitatea de 20-25 Litri , marginile acestuia se trec peste marginile recipientului. In interiorul sacului se poate aseza un strat de hartie igienica pentru a impiedica raspandirea stropilor de urina. Dupa utilizare sacul se strange si se inlocuieste cu unul nou.

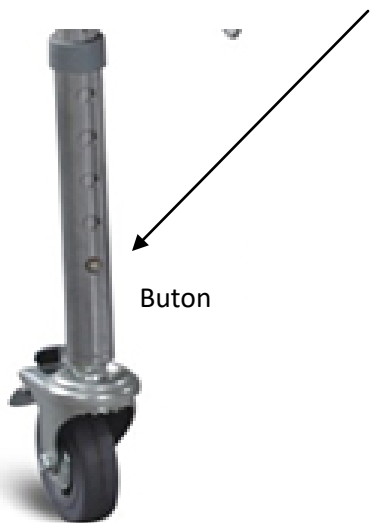


Fig 4.

Daca nu se respecta aceasta regula picioarele de sprijin nu vor avea aceeasi lungime si cadrul ortopedic va fi instabil. Toate cele 4 picioare trebuie sa fie reglate la aceeasi lungime.

Scaunul se inalta suficient astfel incat poate avea si rolul de inaltator vas WC, utila celor care au suferit operatii de sold.

Cele 4 picioare de sprijin sunt prevazute cu roti din cauciuc pentru a facilita o utilizare mai usoara, pentru deplasarea pacientului cu dizabilitati. Doua din cele 4 roti (rotile spate) sunt prevazute cu sistem de blocare pentru fixarea scaunului intr-o pozitie fixa, necesare cand utilizatorul se ridica sau se asaza pe comoda.

Se recomanda verificarea periodica a rotilor din cauciuc ale celor patru picioare si inlocuirea acestora in cazul in care manifesta un grad ridicat de uzura.

Nu depasiti greutatea maxima de utilizare indicata de fabricant-100 kg !
Nota:

Pentru utilizarea corecta a dispozitivelor medicale destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii, in vederea recuperarii unor deficiente organice sau fiziologice cereti sfatul medicului ortoped sau kineto-terapeut. Acest dispozitiv medical face parte din clasa dispozitivelor ajutatoare, este destinat persoanelor cu dizabilitati locomotorii, pentru a le conferi un minim de independenta.

Mod de Intretinere:

Se curata cu o carpa moale si umeda, dupa care se sterge cu o carpa uscata. Puteti folosi sapun lichid sau detergent de vase lichid. Nu folositi materiale abrazive, substante chimice pentru curatare. Folosirea acestora poate conduce la deteriorarea aspectului exterior si al protectiei materialului din care este confectionat.

Comoda wc se poate igieniza periodic: se scot recipientul pentru necesitati, colacul si capacul, se pot spala cu un detergent lichid sau solutie de sapun, se clatesc in jet de apa curenta, se sterg si se monteaza pe scheletul comodei.

Reglajul in inaltime:

Pentru a regla inaltimea scaunului, pe fiecare picior de sprijin al acestuia se afla un buton de reglaj in inaltime. Se alege un picior, se apasa butonul de reglaj, se trage catre exterior partea cu amortizorul de cauciuc pana cand butonul de reglaj va intra in orificiul urmator de pe corpul exterior al piciorului. In acest moment lungimea piciorului de sprijin a crescut cu aproximativ 2,5 cm. Se repeta operatia pana cand se ajunge la lungimea dorita. In mod similar operatiile de reglaj se repeta la fiecare picior de sprijin. Trebuie ca pe fiecare picior butonul de reglaj sa ajunga in orificiul de reglaj similar cu piciorul reglat anterior. **Fig 4.**