

AKUTOL™ Spray pentru arsuri

Descriere generală:

Dispozitiv medical *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* este un hidrogel care conține acid hialuronic și ingrediente vegetale auxiliare. Este indicat pentru tratamentul arsurilor casnice minore de suprafață, de gradul I și IIA și al pielii după expunerea excesivă la soare. *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* formează o peliculă elastică protectoare pe rană, care accelerează procesul de refacere.

Indicații: *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* se utilizează pentru tratamentul arsurilor casnice minore de suprafață, de gradul I și IIA și a pielii după o expunere excesivă la soare.

Gradul I de arsuri – arsuri superficiale (*Combustio erythematosa*) se caracterizează prin simpla înroșire a zonei arse și epiderma neafectată. Procesul de vindecare a unei arsuri de suprafață durează câteva zile și nu există efecte secundare.

La **gradul IIA** (*Arsuri superficiale de grosime parțială - Superficial Combustio bullosa*), se caracterizează prin înroșirea zonei arse și se formează vezicule. Epiderma și derma sunt afectate doar superficial, cu o procedură de tratament corectă, arsura se vindecă complet și fără efecte secundare.

AKUTOL™ Spray pentru arsuri formează pe suprafața arsurii o peliculă elastică care previne uscarea, permite o respirație naturală a răni și protejează împotriva umezelii și micro-organismelor din mediul extern.

Conținutul ridicat de apă, hialuronatul de sodiu și excipienții răcesc și calmează zona arsă. De asemenea, *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* menține un mediu optim de hidratare care favorizează o recuperare rapidă. Stratul de *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* se reaplică continuu pe zona afectată până la vindecarea completă.

Contraindicații:

AKUTOL™ Spray pentru arsuri nu este destinat arsurilor grave de gradul IIB (*Arsuri partial de profunzime - Deep Combustio bullosa*) și III (*Arsuri Integral de profunzime - Combustio escharotica*), atunci când epiderma și derma sunt deteriorate în profunzime sau derma este integral distrusă.

Nu utilizați *AKUTOL™ Spray pentru arsuri* dacă aveți vreo reacție alergică la oricare dintre componentele produsului. A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 3 ani. Consultați un medic pentru utilizarea în timpul sarcinii și alăptării.

Indicații terapeutice: Tratamentul arsurilor casnice minore de suprafață, de gradul I și IIA (arsuri superficiale și superficial parțiale) și a pielii după o expunere excesivă la soare.

Utilizatorul vizat: Pentru populația generală, pentru copii cu vârsta de peste 3 ani și pentru diabetici.

Locul de aplicare preconizat: Zone ale pielii deteriorate termic

Procedura de prim ajutor și utilizarea AKUTOL™ Spray pentru arsuri în cazul arsurilor:

1. Trebuie să îndepărtați zona arsă a corpului de suprafețele fierbinți, lichidele fierbinți, foc, abur sau soare.
2. Răciți zona arsă sub jet de apă cu o temperatură de 8 -12 °C până la dispariția durerii de arsură, se recomandă o durată de până la 15 minute. Dacă apa nu este disponibilă, numai în cazuri excepționale, pentru a răci zona arsă folosiți pulverizări repetate de AKUTOL™ Spray pentru arsuri.
3. Prin apăsarea pulverizatorului, aplicați AKUTOL™ Spray pentru arsuri pe întreaga zonă a arsurii, astfel încât să nu se scurgă de pe zona afectată.
4. Repetați pulverizarea de cel puțin două ori pe zi, astfel încât zona arsă să fie în permanență acoperită cu o peliculă protectoare și să fie menținut principiul vindecării umede.
5. În caz de contact accidental al pulverizatorului cu rana, clătiți pulverizatorul cu apă caldă și după uscare închideți cu capacul.

Durata de timp: Utilizați până când rana este vindecată (de obicei câteva zile).

După o expunere la soare excesivă, până când pielea are un aspect bronzat și dispare senzația de arsură.

Măsurile de siguranță:

În cazul în care pielea devine excesiv de roșie și plină de vezicule după bronzare, în cazul în care locul arsurii se inflamează, dacă aveți dubii sau dacă bășicile continuă să se mărească după tratamentul inițial, consultați întotdeauna un medic.

Evitați contactul cu ochii. Evitați inhalarea spray-ului. Orice incident grav nedorit legat de acest produs ar trebui să fie comunicat producătorului și Institutului de Stat pentru Controlul Medicamentelor.

Recipientul este sub presiune: la încălzire, acesta poate exploda. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

A nu se străpunge sau arde chiar și după utilizare. A se proteja de lumina solară. A nu se expune la temperaturi de peste 50 °C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați ambalajul conform regulilor de eliminare a deșeurilor.

Termen de valabilitate:

A se utiliza cel târziu până la data indicată la baza recipientului.

Compoziție: Aqua, Sodium Hyaluronate, Propylene Glycol, Calendula Officinalis Flower Extract, Carbomer, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide.

Nu conține substanțe medicamentoase, materiale biologice, derivate din sânge


Data revizuirii textului: Ianuarie 2019



AVEFLOR, a.s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Republica Cehă



e 50 ml

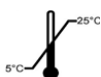

termen de valabilitate, la baza recipientului



Distribuitor: EST INVEST FARMA S.R.L., Iași, Str. Arh. Ion Berindei, nr. 68, parter
0232.233.386. office@estinvestfarma.ro